

## Medizinisches Wärme-Kältekissen | Art. 1009 | 20x35cm



### Beschreibung

Wickel und Kompressen, Einschlafstörungen, Gliederschmerzen, Unterleibsbeschwerden...

- **Größe:** 20x35cm, Füllgewicht: 900g

Inspiziert von der klassischen **Wärmflaschenform** und Farbgebung wird diese Variante besonders häufig eingesetzt. Charakteristisch ist die Längsstepung (im hygienischen Schweißverfahren), die das Produkt besonders flexibel macht. Neben den üblichen Einsatzbereichen wie **Einschlafstörungen**, **Gliederschmerzen** und **Unterleibsbeschwerden** kann dieses Kissen auch ideal für **Wickel und Kompressen** genutzt werden.

- **Material:** med37Grad-Tex / brombeere / bi-elastisch
- mittels Wischdesinfektion zu desinfizieren
- milbendicht, bakterio- und fungostatisch,
- mikrobenehmende Sanitized-Beschichtung,
- atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig,
- flammhemmend nach BS 7175 crib 5,
- Öko-Tex class1, PVC/FCKW-frei,
- hautfreundlich gemäß ISO10993

### Mehrwert als 2 in 1 Produkt und Vorteile von Traubenkernkissen:

- Kosteneffizienz durch **Doppelanwendung (warm/kalt)**
- Vermeidung von Verbrennungen durch dosierbare, sekundengenaue Erwärmung
- auch als Kältekissen direkt aus dem Tiefkühler anwendbar - bleibende Flexibilität und gute Modellierbarkeit
- hygienisch rein durch **abwischbare Bezüge**
- Unfallrisiko-Vermeidung für das Pflegepersonal beispielsweise durch Entfall des Befüllens mit heißem Wasser
- Gefahrenminimierung für ihre Patienten, z.B. kein Auslaufen von heißem Wasser

- durch die angenehm milde Kälteabgabe können kaum Erfrierungen/Verbrennungen hervorgerufen werden (Entfall des AUTSCHEFFEKTES)
- keine Verunreinigung der Klinikwäsche, z.B. durch auslaufendes Gel
- Anwendung als Stützkissen mit leichtem Massageeffekt
- sehr lange Zeit **wiederverwendbar**
- Bezüge sind atmungsaktiv und beugen der Mazeration der Haut vor (Dekubitusprophylaxe)
- Traubenkerne sind ein natürlich nachwachsender Rohstoff und schonen die Umwelt

#### **Unsere Medizinischen Traubenkernkissen eignen sich hervorragend für den Einsatz als Wärme- und Kältekompressen**

- im pflegerischen Bereich
- im postoperativen Bereich auf Stationen
- als Unterstützung in der Aromapflege
- auf chirurgischen Stationen
- in der Hebammen- und Säuglingspflege

und vielen anderen.

#### **Wärmekompressen z.B. bei:**

- Abdomenschmerzen
- Rheuma
- grippalen Infekten
- **Verspannungen**
- Unterleibsbeschwerden

und für alle weiteren Anwendungen, bei denen Wärme zur Linderung/Therapie angezeigt ist.

#### **Kältekompressen z.B. bei:**

- operativer Nachsorge
- **Sportverletzungen** (Prellung, Verstauchung, Zerrung von Muskeln oder Sehnen)
- Hämatomen oder Entzündungen
- Migräne
- Sonnenbrand
- Insektenstichen

und für alle weiteren Anwendungen, bei denen Kälte zur Linderung/Therapie angezeigt ist.

#### **Gebrauchsinformation warm**

Unsere Medizinischen Traubenkernkissen werden in der Mikrowelle (bis zu 800 Watt, keine Grillfunktion) je nach Größe und Gewicht unterschiedlich lange erwärmt. Die Detailinformation für jedes Produkt entnehmen Sie bitte dem an jedem Kissen aufgedruckten Sicherheitsmerkmal - Anleitung mit Zeitangabe. Sekundengenaueres Erwärmen auf die perfekt abgestimmte Anwendungstemperatur ist somit unkompliziert möglich.

#### **WICHTIG**

Erst nach vorangegangener Handprüfung das Wärmekissen auf die gewünschte Körperstelle auflegen. Wir empfehlen die Verwendung eines Baumwollbezuges erst nach erfolgter Handrückenprüfung am Produkt (Überzüge verfälschen das Temperaturempfinden).

Achten Sie auf die unterschiedliche Wärmeempfindlichkeit der Haut bei Kleinkindern und sensibilitätsgestörten Personen gegenüber Erwachsenen und normal empfindlichen Personen.

Bei nochmaligem Erwärmen (noch temperiertes Produkt) das Kissen zuvor durchschütteln und die Aufwärmzeit halbieren.

Wir empfehlen das Produkt vollständig auskühlen zu lassen bzw. ein neues Kissen zu verwenden.

### **Gebrauchsinformation kalt**

Unsere Medizinischen Traubenkernkissen im Gefrierfach/in der Gefriertruhe mindestens 4-5 Stunden vor Anwendung lagern, damit es genügend Kälte aufnehmen kann.

Die Intensität der Kälteabgabe lässt sich steigern, indem man das Kissen z.B. mit einem Handtuch nach außen abdeckt.

#### **WICHTIG**

Erst nach vorangegangener Handprüfung das Kältekissen auf die gewünschte Körperstelle auflegen. Durch die angenehm milde Kälteabgabe (nicht so aggressiv - dadurch Entfall des Autscheffektes) erreichen Sie eine Tiefenkühlung z.B. auch an Gelenken.

Kältekissen sollten immer nur kurzfristig, kontrolliert und gezielt eingesetzt werden.

Achten Sie auf die unterschiedliche Temperaturempfindlichkeit der Haut bei Kleinkindern und sensibilitätsgestörten Personen gegenüber Erwachsenen und normal empfindlichen Personen.

Achten Sie auf Kontraindikationen für Kälteanwendungen wie z.B. bei: Neugeborenen und Kleinkindern, bewußtlosen, narkotisierten und gelähmten Personen, Morbus Raynaud und vielen weiteren mehr.

### **Med37Grad**

Seit jeher weiß man in der Pflege und Medizin um die positive und heilende Wirkung von Wärme und Kälte in nahezu allen Bereichen und deren unterschiedliche Anwendung. 37Grad Traubenkernkissen bieten eine gesunde, sichere Alternative zu herkömmlichen Wärme-/Kälte-Kompressen.

Als natürlicher Grundstoff werden hier Traubenkerne verwendet, die ganz besondere thermische Speichereigenschaften aufweisen und in speziellen Verfahren gereinigt, getrocknet und entstaubt werden.

Neben den jahrelang erprobten Traubenkernkissen für den privaten Anwender haben wir nun eine neue, geprüfte und zertifizierte Linie für den medizinischen Bereich entwickelt. Sie hebt sich von anderen Produkten durch spezielle Bezüge und Formen für eine breite Anwendungspalette ab, bietet dem Pflegepersonal eine erleichterte, sichere Anwendung und Ihren Patienten größten Komfort. Sie wurde bereits vielfach erprobt und eingesetzt, z. B. an Kliniken, Privatkliniken und Pflegeheimen im In- und Ausland.

### **Hygieneinformationen**

Die Kissen können mit den gängigsten Desinfektionsmitteln gereinigt bzw. desinfiziert werden. Für eine genaue Abstimmung der Oberflächendesinfektion werfen Sie einen Blick in unsere Desinfektionsmittelliste (als Download bei Service für Ihr Haus verfügbar).

### **Technische Ausstattung**

Die Bezüge unserer medizinischen Kissen sind aus Hightech-Materialien, die speziell für die hohen Hygieneansprüche in Kliniken und Pflegeheimen ausgerüstet sind. Z.B. weisen sie eine mikrobenhemmende Sanitized-Beschichtung auf, sind milbendicht, bakteriostatisch und bakterienhemmend und durch Wischdesinfektion zu desinfizieren.

Für genaue Informationen fordern Sie das technische Datenblatt unserer 37Grad Bezüge an.